

# Procise Opsamlingskit til afføring

## Fremgangsmåde [Ref: 4912, 4913]

ProciseDx 

Opsamlingskit til afføring er udviklet til, at patienten selv kan foretage opsamling af afføring i hjemmet mhp. analyse for proteinet Calprotectin.  
Prøveglasset returneres til rette sundhedsfaglige kontaktperson.  
Kun til brug for In-vitro diagnostik – ikke godkendt i USA.

Obs! Når alle trin er udført, kan afføringsstykket til toilettet skyldes ud.  
Prøve: Afføring, som er så tynd eller for hård til, at den kan sidde fast på proben til prøveglasset, kan ikke anvendes.

Følgende er inkluderet:

<b>GLOVES</b>		Handsker
<b>LINER</b>		Afføringsstykke til toilet
<b>COLLECTION</b>		Opsamlingskit til afføring
<b>TRANSPORT</b>		Transportpose


### Step 1 Forberedelse



**A** Fastgør afføringsstykket til toilettet ved hjælp af klistermærkerne, og slå så toiletsædet ned.

**B** Foretag afføringen og vask derefter hænder.

### Step 2 Tag den hvide probe ud ved at dreje den og trække den ud af prøveglasset

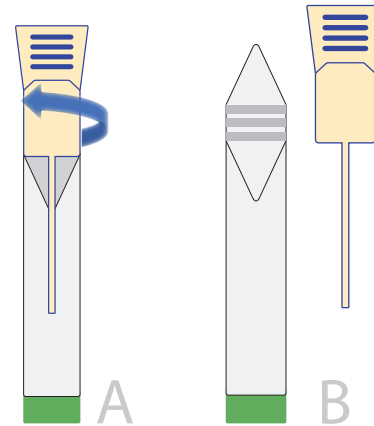


Anvend handsker under dette og det næste trin.

**Fjern ikke den grønne prop!**


Obs! Vær opmærksom på, at prøverøret forbliver i lodret stilling som vist på billedet.

### Step 3 Opsaml prøven ved at føre den hvide probe ned i afføringen 3-5 gange.

Vær opmærksom på at alle riller på spidsen af proben er helt dækket af afføring.

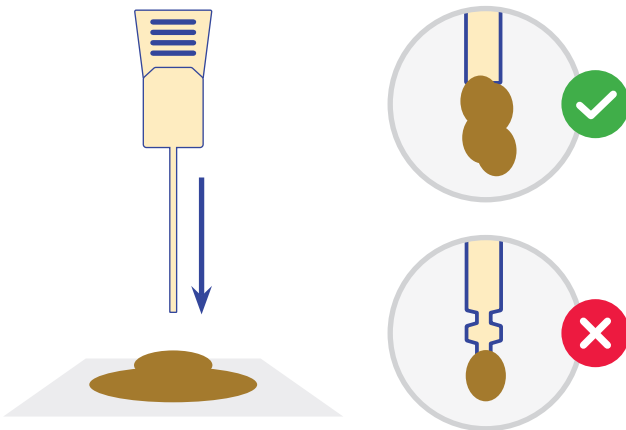

### Step 4 Sæt den hvide probe tilbage i prøveglasset. Når den er helt lukket, høres et klik, og der er ikke noget luft i mellem den hvide probe og prøveglasset.

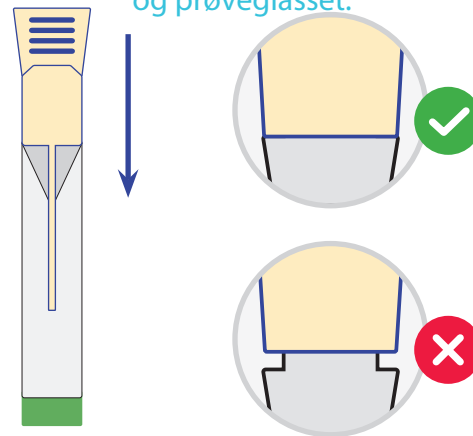

Skriv dit navn og dato for afføringsprøven på prøveglasset. Læg prøveglasset tilbage i posen. Opbevar det på køl eller ved stuetemperatur, indtil det skal returneres til rette sundhedsfaglige kontaktperson inden for 5 dage. Afføringsstykket til toilettet kan skyldes ud, handskerne kan smides ud som restaffald. Din sundhedsfaglige kontaktperson kan være behjælpelig med udlevering af et nyt opsamlingskit.



Advarsel og forholdsregler:

- Kun til udvendig brug – Fjern ikke den grønne prop – Hæld/spild ikke væsken i prøverøret – Indtag ikke væsken
- I tilfælde af at væsken kommer i kontakt med



Flydende stabilisator indeholder Urinstofkoncentration > 1%. Undgå kontakt med øjne og hud. Hvis dette sker, skyld området med rindende vand.



ProciseDx Inc. 9449 Carroll Park Dr  
San Diego, CA 92121 USA



Qarad EC-REP BV  
Pas 257, 2440 Geel, Belgium

