

QUICK GUIDE TIL AMNIOQUICK aflæst på BSX Reader

1 Testforberedelse

Placer Amnioquick og reader på en flad, stabil, vibrationsfri overflade indtil resultatet vises.



1a) Tag et testkit indeholdende:

- Kort med QR-kode
- Steril vaginal vatpind
- Buffer
- Testkassette

Pak alle dele ud (inkl. testkassette) og klargør de enkelte dele




1b) Tænd readeren ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen.

Log ind:

User ID: xxxx
Password: xxxx

2 Foretag test

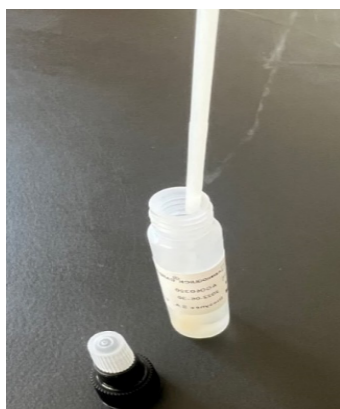

2a) Den sterile vatpind indføres 5 cm i vagina i 60 sekunder (ved brug af speculum 15 sekunder) mod fornex superior.

Vatpinden føres derefter ned i beholderen med buffervæske efter denne er åbnet. Kør derefter vatpinden rundt i buffervæsken i ca. 10 sek. og fjern den ved at presse flaskehalsen sammen om vatpinden således, at dens overskydende væske presses ud.

Skrub den sorte prop på buffervæskens beholder, og vend denne ca. 5-6 gange.

Obs! Prøvematerialet kan holde sig i 6 timer ved stuetemperatur – det anbefales dog, at prøven udføres umiddelbart efter prøvetagning.

3 Visning af resultat



3a) Skru den lyse hætte af buffervæsken og påfør 3 dråber i prøvebrønden (markeret med S=sample).



3b) Vælg: **START NEW TEST** og vælg efterfølgende testen Amnioquick Card - tryk dernæst **CONTINUE**.

Scan QR-koden på det kort, som følger med testkittet.

Indtast efterfølgende **Patient ID** (enten manuelt eller vha. stregekodelæseren).



3c) Testkassetten indsættes i bakken, som åbnes manuelt. Den automatiske aflæsning påbegyndes.

Inkubationen sker automatisk, hvorfor readeren tæller ned fra 10 min.

Obs! Testkassetten skal klikkes ned i bakken og vende, så prøvebrønden vender udad og teksten på kassetten fortsat kan læses, når den er i bakken.



3d) Efter 10 min. aflæses testresultatet automatisk og vil fremgå som positivt eller negativt. Resultatet lagres i readeren.