

# QUICK GUIDE TIL PREMAQUICK aflæst på BSX Reader

## 1 Testforberedelse

Placer Premaquick-testen og reader på en flad, stabil, vibrationsfri overflade indtil resultatet vises.



1a) Tag et testkit indeholdende:

- Kort med QR-kode
- Steril vaginal vatpind
- Buffer
- Testkassette

Pak alle dele ud (inkl. testkassette) og klargør de enkelte dele




1b) Tænd readeren ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen.

Log ind:

User ID: xxxx  
Password: xxxx

## 2 Foretag test

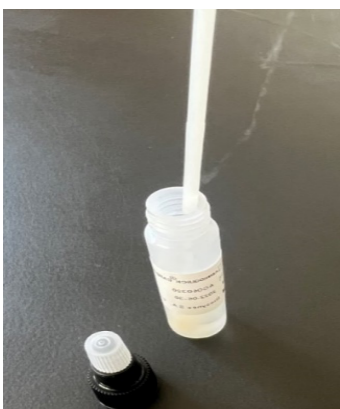

2a) Ved hjælp af speculum indføres den sterile vatpind i skeden, og prøven opsamles fra fornex superior ved at holde vatpinden mod skedevæggen i 15 sekunder.

Vatpinden føres derefter ned i beholderen med buffervæske efter denne er åbnet. Kør derefter vatpinden rundt i buffervæsken i ca. 10 sek. og fjern den ved at presse flaskehalsen sammen om vatpinden således, at dens overskydende væske presses ud.

Skrue den sorte prop på buffervæskens beholder, og vend denne ca. 5-6 gange.

*Obs! Prøvematerialet kan holde sig i 6 timer ved stuetemperatur – det anbefales dog, at prøven udføres umiddelbart efter prøvetagning.*

## 3 Visning af resultat



3a) Skru den lyse hætte af buffervæsken og påfør 3 dråber i hver af de 3 prøvebrønde (markeret med S=sample).



3b) Vælg: **START NEW TEST** og vælg efterfølgende testen Premaquick - tryk dernæst **CONTINUE**.

**Scan QR-koden** på det kort, som følger med testkittet.

Indtast efterfølgende **Patient ID** (enten manuelt eller vha. stregekodelæseren).



3c) Testkassetten indsættes i bakken, som åbnes manuelt. Den automatiske aflæsning påbegyndes.

Inkubationen sker automatisk, hvorfor readeren tæller ned fra 10 min.

Obs! Testkassetten skal klikkes ned i bakken og vende, så prøvebrønden vender udad og teksten på kassetten fortsat kan læses, når den er i bakken.



3d) Efter 10 min. aflæses testresultatet automatisk og vil fremgå som positivt eller negativt. Resultatet lagres i readeren.